

車椅子シートベルト 背固定タイプ 取扱説明書



■お使いになる前に

- 看顧者、介護者の目の届く範囲でご使用下さい。
- 取扱説明書をよくお読みの上お使い下さい。



禁止

- 普通型の車椅子以外には使用しないで下さい。
特にリクライニング車椅子の場合、リクライニング時に
首や腹部など身体を圧迫する可能性があります。
- 本品の加工・改造は行わないで下さい。

■ご使用方法

- 背もたれの背面と腹部を一周するようにベルトを回します。
- バックルを止め、ベルトのサイズを調整してください。

■お手入れの方法について



- 洗濯の際はバックルを留め、ネットに入れてください

■商品製造元



株式
会社

特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40
tel.011-663-0761 fax.011-663-0955 <http://tomoni.co.jp/>