

車椅子シートベルト カーバックルタイプ 取扱説明書



■お使いになる前に

- 看護者、介護者の目の届く範囲でご使用下さい。
- 取扱説明書をよくお読みの上お使い下さい。



禁止

- 普通型の車椅子以外には使用しないで下さい。
特にリクライニング車椅子の場合、リクライニング時に
首や腹部など身体を圧迫する可能性があります。
- 本品の加工・改造は行わないで下さい。

■ご使用方法

- 背もたれの背面と腹部を一周するようにベルトを回します。
- バックルを止め、ベルトのサイズを調整してください。
- バックル中央の赤い部分を押しと、バックルが外れます。

■お手入れの方法について

- 洗濯機はお使いいただけません。
- ベルトの部分を洗う場合は、手洗いしてください。
- バックル部分を濡らさないようにご注意下さい。

■商品製造元



株式会社

特殊衣料

〒063-0834 札幌市西区発寒 14 条 14 丁目 2-40

tel.011-663-0761 fax.011-663-0955

<http://tomoni.co.jp/>